

AED INSTRUKTION FRED EASY

1. TÆND HJERTESTARTEREN PÅ DEN GRØNNE KNAP, MÆRKET MED ①
2. PLACER ELEKTRODERNE PÅ TØR, BAR HUD SOM VIST PÅ HJERTESTARTEREN.
HVIS DER ER FLERE TIL STEDE, FORTSÆT HJERTE-LUNGE-REDNING MENS ELEKTRODERNE MONTERES.
3. FØLG MASKINENS INSTRUKTIONER. HVIS DER SKAL AFGIVES STØD LYSER KNAPPEN MED ⚡-SYMBOLET OG DER TRYKES PÅ KNAPPEN.

