

AED INSTRUKTION

IPAD

1. INDSTIL HJERTESTARTEREN TIL BARN (UNDER 8 ÅR/25 KG) ELLER VOKSEN (OVER 8 ÅR/25 KG) PÅ KONTAKTEN I ØVERSTE VENSTRE HJØRNE.
2. TÆND HJERTESTARTEREN PÅ DEN GRØNNE KNAP, MÆRKET MED ①
3. ELEKTRODERNE ER PLACERET I ET RUM PÅ BAGSIDEN AF MASKINEN. PLACER ELEKTRODERNE PÅ TØR, BAR HUD SOM VIST PÅ HJERTESTARTEREN. HVIS DER ER FLERE TIL STEDE, FORTSÆT HJERTE-LUNGE-REDNING MENS ELEKTRODERNE MONTERES.
4. FØLG MASKINENS INSTRUKTIONER. HVIS DER SKAL AFGIVES STØD LYSER KNAPPEN MED ⚡-SYMBOLET.

