

AED INSTRUKTION LIFEPAK CR 2

1. FJERN LÅGET PÅ HJERTESTARTEREN – HJERTESTARTEREN STARTER AUTOMATISK.
2. PLACER ELEKTRODERNE PÅ TØR, BAR HUD SOM VIST PÅ HJERTESTARTEREN. HVIS DER ER FLERE TIL STEDE, FORTSÆT HJERTE-LUNGE-REDNING MENS ELEKTRODERNE MONTERES.
3. FØLG MASKINENS INSTRUKTIONER. HVIS DER SKAL AFGIVES STØD, SÅ TRYK PÅ DEN RØDE KNAP MED HJERTESYMBOLLET. I DEN FULDAUTOMATISKE VERSION AFGIVES AUTOMATISK STØD.

