

## AED INSTRUKTION PHILLIPS HEARTSTART

1. FJERN LÅGET PÅ HJERTESTARTEREN OG LÆG DENNE TIL SIDE. HJERTESTARTEREN STARTER AUTOMATISK.  
ALTERNATIVT KAN DE STARTE HJERTESTARTEREN PÅ DEN TURKISFARVEDE KNAF.
2. PLACER ELEKTRODERNE PÅ TØR, BAR HUD SOM VIST PÅ HJERTESTARTEREN.  
HVIS DER ER FLERE TIL STEDE, FORTSÆT HJERTE-LUNGE-REDNING MENS ELEKTRODERNE MONTERES.
3. FØLG MASKINENS INSTRUKTIONER. HVIS DER SKAL AFGIVES STØD, TRYKES PÅ DEN BLINKENDE RØDE KNAF MED ⚡-SYMBOLET.

