

AED INSTRUKTION

ZOLL AED PLUS

1. FJERN DET GRØNNE LÅG OG TÆND FOR HJERTESTARTEREN PÅ DEN LILLA ON/OFF KNAPE NEDERST TIL HØJRE.
2. PLACER ELEKTRODERNE PÅ TØR, BAR HUD SOM VIST PÅ BILLEDERNE. HVIS DER ER FLERE TIL STEDE, FORTSÆT HJERTE-LUNGE-REDNING MENS ELEKTRIDERNE MONTERES.
3. FØLG MASKINENS INSTRUKTIONER. HVIS DER SKAL AFGIVES STØD, TRYK PÅ KNAPPEN MED DET BLINKENDE HJERTESYMBOL I MIDTEN AF HJERTESTARTEREN.

